

**LINEA CORPORAL**

# **GIMNASIA PASIVA 8 SALIDAS**

## GIMNASIA PASIVA 8 SALIDAS



### DESCRIPCIÓN

El Equipo de Gimnasia Pasiva 8 Salidas es un dispositivo de electroestimulación muscular (EMS) diseñado para tonificar y fortalecer los músculos mediante impulsos eléctricos controlados. Ofrece 8 canales de salida, permitiendo trabajar múltiples áreas del cuerpo al mismo tiempo con 16 electrodos grandes que se colocan en zonas como abdomen, piernas, brazos, espalda y glúteos. Con 4 programas predefinidos y un programa automático, este equipo se adapta a diversas necesidades, incluyendo tonificación muscular, reducción de grasa localizada, rehabilitación muscular, y mejora de la flacidez. Además, estimula la circulación sanguínea, favorece la relajación y tiene un efecto antiinflamatorio. Funciona con voltaje de 110V-220V, frecuencia de 50-60 Hz y un consumo eficiente de 25W. Su diseño intuitivo permite ajustar el tiempo de contracción y relajación para personalizar cada tratamiento, haciéndolo ideal para aplicaciones estéticas y terapéuticas.

# ANÁLISIS Y USO



## 1. Preparación del Equipo:

Conecta el equipo a la corriente (110V-220V) y enciéndelo.

## 2. Colocación de Electrodo:

Limpia la piel de la zona a tratar y coloca los 16 electrodos grandes en las áreas deseadas (abdomen, piernas, brazos, etc.).

## 3. Selección del Programa:

elige uno de los 4 programas predefinidos o el programa automático según el objetivo (tonificación, reducción de grasa, rehabilitación).

## 4. Ajuste de Parámetros:

Configura la intensidad, tiempo de contracción (0.1-5 s) y relajación (0.1-5 s) según las necesidades del tratamiento.

## 5. Inicio del Tratamiento:

Inicia el programa y verifica la comodidad del usuario. Ajusta la intensidad si es necesario.

## 6. Finalización y Limpieza:

Apaga el equipo, retira los electrodos y limpia tanto la piel como los accesorios para mantenerlos en óptimas condiciones.

# BENEFICIOS Y RESULTADOS

## Beneficios


- Tonificación Muscular
- Reducción de Grasa Localizada
- Rehabilitación Muscular
- Mejora Circulatoria
- Efecto Antiinflamatorio y Relajante



## Resultados:

- Modelado Corporal
- Mayor Elasticidad Cutánea
- Recuperación Acelerada
- Bienestar General



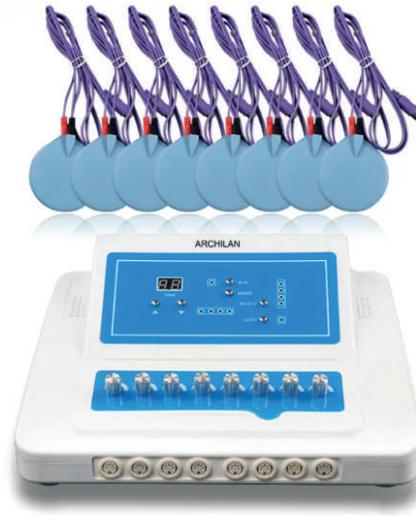

## GIMNASIA PASIVA 8 SALIDAS

### Especificaciones Técnicas

<i>Voltaje nominal</i>	AC110V+10%, 60Hz+1Hz	<i>Tiempo máximo</i>	0 - 30 minutos
<i>Energía nominal</i>	$\leq 50W$	<i>Frecuencia de pulso</i>	25Hz/s-800Hz/s
<i>Corriente de salida</i>	$\leq 50MA$	<i>Ancho de pulso</i>	0-270, ajustable
<i>Salida de pulsos</i>	08 canales	<i>Peso/Tamaño</i>	7.5 kg/37X35X30 cm



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec