



LINEA MEDICA

HIFU 7D DE MESA

HIFU 7D DE MESA



DESCRIPCIÓN

El HIFU 7D de mesa es un equipo médico avanzado que utiliza ultrasonido focalizado de alta intensidad para tratamientos no invasivos en cara y cuerpo. Es ideal para levantar y tensar la piel, reducir flacidez y remodelar el colágeno, logrando resultados naturales y efectivos. Para el rostro, mejora el tono, elasticidad y reduce arrugas, pliegues nasolabiales y papada, además de ofrecer levantamiento de cejas. En el cuerpo, reafirma tejidos, mejora la apariencia de celulitis, estrías y cicatrices, mientras ayuda a contornear y adelgazar áreas específicas. Su tecnología incluye transductores con profundidades de 1.5 mm a 13.0 mm, adaptándose a diferentes necesidades, y una exclusiva sonda de 2.0 mm para detalles precisos. Con energía ajustable y 20,000 disparos por cartucho, garantiza tratamientos personalizados.

ANALISIS Y USO



Preparación del Equipo: Encender el equipo y seleccionar el cartucho adecuado según la profundidad requerida:

1.5 mm, 3.0 mm o 4.5 mm para rostro.; 6 mm, 9 mm o 13 mm para cuerpo. La sonda de 2.0 mm es ideal para áreas delicadas o precisas.

Configurar parámetros: energía (0.2J-2.0J), distancia (1-2 mm) y longitud de disparo (5-25 mm).

Preparación del Paciente: Limpiar y desinfectar el área de tratamiento. Aplicar un gel conductor para facilitar la transmisión del ultrasonido.

Aplicación del Tratamiento: Colocar la pieza de mano en la piel y realizar los disparos siguiendo un patrón uniforme.

Asegurarse de cubrir toda el área a tratar, ajustando parámetros según la sensibilidad del paciente.

Monitoreo Durante el Tratamiento:

Verificar la comodidad del paciente y evitar superposición de disparos.

Asegurarse de que la pieza de mano esté en contacto constante con la piel para optimizar resultados.

Finalización:

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- No invasivo
- Resultados visibles
- Reafirmación de la piel
- Estimulación de colágeno
- Versatilidad: Tratamientos para rostro (mejillas, mandíbula, cejas) y cuerpo (abdomen, muslos, brazos).
- Reducción de grasa localizada
- Personalización: Profundidades y energías ajustables
- Mejora la textura de la piel



Resultados:

Rostro: Elevación de mejillas y cejas.

Reducción de papada y pliegues nasolabiales.

Mejora del tono, elasticidad y brillo natural de la piel.

Cuerpo: Reafirma tejidos en abdomen, muslos y brazos.

Reducción visible de celulitis y grasa localizada.

Mejora de la textura en áreas con estrías o cicatrices.





HIFU 7D DE MESA

Especificaciones Técnicas

VOLTAJE 100V-240V, 50/60HZ

DISPAROS 20.000

FRECUENCIA 4 MHz

ENERGÍA 0.2J-2.0J (Ajustable,
0.1J/step)

CARTUCHOS 1.5 mm
2.0mm
3.0mm
4.5mm
6.0mm
9.0mm
13.0mm

PODER MÁXIMO 300W



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec