



LINEA FACIAL

HYDRA PEN

HYDRA PEN



DESCRIPCIÓN

El Hydra Pen es un dispositivo estético avanzado que combina microneedling con infusión de sueros. Crea microcanales en la piel para estimular la producción de colágeno y elastina.

Esto mejora la firmeza, elasticidad y textura general del rostro y cuerpo. Permite una mayor absorción de productos tópicos como serums hidratantes y reparadores.

Reduce arrugas, líneas de expresión, cicatrices de acné y poros dilatados. Cuenta con agujas ajustables de 0.25 mm a 1.5 mm para personalizar cada tratamiento.

Funciona de forma automática con velocidades regulables y mínima molestia. Incluye un sistema de vibración que reduce el dolor durante el procedimiento. Tiene batería recargable con 3 a 4 horas de autonomía y carga USB. El cartucho integrado permite aplicar el producto directamente mientras se realiza el microneedling. Su diseño portátil y liviano lo hace ideal para profesionales y uso personal. Es una opción efectiva, segura y no invasiva para rejuvenecer la piel.

ANALISIS Y USO



1. Limpieza profunda de la piel antes del tratamiento.
2. Colocación del serum en el cartucho (ácido hialurónico, vitamina C, péptidos, etc.).
3. Ajuste de la velocidad y longitud de las agujas según la zona a tratar.
4. Aplicación del dispositivo sobre la piel con movimientos suaves y uniformes.
5. El dispositivo realiza microcanales mientras infunde el producto en tiempo real.
6. Finalizar con productos calmantes o mascarilla post-tratamiento.
7. Repetir sesiones cada 2-4 semanas según el objetivo.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Rejuvenecimiento no invasivo.
- Estimula colágeno y elastina.
- Mejora absorción de serums.
- Hidratación y nutrición profunda.
- Reduce arrugas y líneas finas.
- Atenúa cicatrices y marcas.
- Disminuye el tamaño de los poros.
- Unifica tono y textura.
- Tratamiento ajustable y preciso.
- Sin tiempo de recuperación.
- Sin tiempo de recuperación prolongado.



Resultados:

- Piel más suave y luminosa.
- Menos arrugas y marcas.
- Poros visiblemente más pequeños.
- Menos enrojecimiento y acné activo.
- Más elasticidad y firmeza.
- Resultados duraderos con sesiones.





HYDRA PEN

Especificaciones Técnicas

<i>Velocidades ajustables</i>	3 a 4 niveles, según el modelo	<i>Capacidad del cartucho de suero</i>	3 ml a 5 ml
<i>Número de agujas por cartucho</i>	12 a 36 microagujas	<i>Tiempo de carga</i>	60 a 90 minutos
<i>Longitud de agujas</i>	76" / 194 cm	<i>Pantalla</i>	LED indicadora de velocidad y nivel de batería
<i>Incluye puerto</i>	USB	<i>Método de operación</i>	Automático, con sistema de vibración



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec