



**LINEA MEDICA**

# **LASER FRACCIONADO CO2 PORTABLE**

# LASER FRACCIONADO CO2 PORTABLE



## DESCRIPCIÓN

El dispositivo láser fraccional es un equipo médico estético avanzado, diseñado para tratamientos de mejora de la piel y cuerpo. Utiliza tecnología de láser CO2 fraccional para ofrecer una amplia variedad de funciones estéticas, como eliminación de arrugas, limpieza profunda, eliminación de pigmentos, blanqueamiento, revitalización de la piel, desintoxicación, reducción de poros, eliminación de vasos sanguíneos, rejuvenecimiento de la piel, tratamiento de círculos oscuros, hidratación, corrección de pigmentación, exfoliación, anti-puffiness, apriete de la piel y aligeramiento. Este dispositivo es ideal para su uso comercial en clínicas de estética y spas, ofreciendo un sistema de operación sencillo y controles intuitivos a través de una pantalla táctil. Su alto poder de 3000W garantiza un rendimiento eficaz, mientras que los materiales de construcción como ABS y acero inoxidable aseguran durabilidad y una larga vida útil. El WM-FR02 proporciona resultados visibles en poco tiempo, siendo perfecto para tratamientos de estética no invasiva.

# ANÁLISIS Y USO

---



*Selección del tratamiento:*

*Configuración del dispositivo:* Ajustar las configuraciones del dispositivo según las necesidades específicas del tratamiento, como la intensidad de los pulsos, la frecuencia y el tiempo de exposición.

*Elección de la función adecuada:* Seleccionar entre las diversas funciones del dispositivo como eliminación de arrugas, eliminación de pigmentos, rejuvenecimiento de la piel, etc.

*Aplicación del tratamiento:*

*Colocación del dispositivo:* Colocar cuidadosamente la pieza de mano del dispositivo en la zona a tratar.

*Iniciar el tratamiento:* Comenzar el tratamiento con los pulsos de láser CO2 fraccional, guiando la pieza de mano a través de la zona para emitir los pulsos de energía.

*Monitoreo y control durante el tratamiento:*

*Uso de luz de puntería:* Utilizar la luz de puntería para asegurar precisión durante el tratamiento y evitar áreas no deseadas.

*Revisar la reacción del paciente:* Monitorear la reacción del paciente a la luz y ajustar la intensidad si es necesario para minimizar la incomodidad.

# BENEFICIOS Y RESULTADOS

## Beneficios

- Rejuvenecimiento de la piel
- Eliminación de cicatrices
- Tratamiento de pigmentación
- Reducción de poros dilatados
- Revitalización y desintoxicación
- Control de la grasa
- Tratamiento de acné
- Mejora del tono y la elasticidad de la piel
- Reducción de círculos oscuros y ojeras



## Resultados:

- Resultados visibles en poco tiempo
- Durabilidad de los resultados
- Menos necesidad de cirugías invasivas
- Mejora general de la salud de la piel
- Resultados personalizados





## LASER FRACCIONADO CO2 PORTABLE

### Especificaciones Técnicas

<i>Voltaje</i>	AC220V, 50/60Hz, 10A	<i>Rango de potencia</i>	Hasta 60W (con avance a 1W)
<i>Peso del equipo</i>	22 kg	<i>Método de salida</i>	Pulso ultra, pulso único continuo
<i>Tamaño del equipo</i>	560 mm X 400 mm X 1100 mm	<i>Longitud de onda</i>	Aproximadamente 10,600 nm



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec