



**LINEA MEDICA**

# **LIPOSONIX VERTICAL**

# LIPOSONIX VERTICAL

---



## DESCRIPCIÓN

*El Liposonix Vertical es un equipo médico estético que utiliza ultrasonido enfocado de alta intensidad (HIFU) para la reducción efectiva de grasa y mejora del contorno corporal. Trabaja a profundidades subcutáneas de 13 mm y 8 mm, destruyendo células grasas de forma permanente sin dañar la epidermis, vasos sanguíneos ni nervios. Además, estimula la contracción y regeneración del colágeno, dejando la piel firme y tersa. Es un tratamiento no invasivo, ideal para reducir medidas, promover el metabolismo y mejorar la apariencia general del cuerpo.*

*Cuenta con una pantalla táctil de 10.4", potencia ajustable entre 35 y 75 J/cm<sup>2</sup>, y modos de trabajo flexibles. Su diseño incluye refrigeración por aire, un peso de 37 kg y dimensiones compactas. Es seguro, eficiente y proporciona resultados visibles en pocas sesiones.*

# ANÁLISIS Y USO

---



## *Evaluación Inicial*

*Realizar una consulta para identificar las áreas con acumulación de grasa localizada. Confirmar que el paciente es apto para el tratamiento (IMC menor de 30, buena salud general y sin contraindicaciones).*

## *Preparación del Paciente*

*Limpiar y desinfectar la piel en la zona a tratar. Dibujar una cuadrícula sobre el área objetivo para facilitar el trabajo por bloques.*

## *Configuración del Equipo*

*Encender el dispositivo y ajustar los parámetros (potencia, profundidad, puntos por disparo) según la zona y objetivos del tratamiento. Seleccionar el tip adecuado (8 mm o 13 mm) dependiendo del grosor de la grasa.*

## *Aplicación del Gel de Acoplamiento*

*Aplicar gel de contacto para facilitar la transmisión de la energía ultrasónica y evitar molestias.*

## *Realización del Tratamiento*

*Posicionar el transductor sobre cada bloque de la cuadrícula. Activar el ultrasonido y proceder de manera sistemática bloque por bloque. Ajustar pausas y activaciones para optimizar los resultados según las necesidades del paciente.*

# BENEFICIOS Y RESULTADOS

## Beneficios

- Reducción Permanente de Grasa
- Contorno Corporal Mejorado
- Estimulación del Colágeno
- No Invasivo y Seguro
- Resultados Rápidos y Visibles
- Personalización del Tratamiento
- Estimulación del Metabolismo
- Resultados permanentes



## Resultados:

*Reducción de Medidas:* Disminución de hasta 2.5 cm en el área tratada tras una sola sesión.

*Piel Más Firme:* Apariencia rejuvenecida y tensada en las zonas tratadas.

*Menor Aparición de Grasa Localizada:* Mejora visible en áreas problemáticas.

*Mayor Confianza en la Imagen Corporal:* Resultados estéticos que ayudan al paciente a sentirse mejor consigo mismo.





## LIPOSONIX VERTICAL

### Especificaciones Técnicas

|                                   |  |                           |   |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---|
| <i>Pantalla</i>                   | Táctil de 10.4", interfaz intuitiva y fácil de usar. | <i>Potencia de Salida</i> | Rango de 35 a 75 J/cm <sup>2</sup> (configurable) |
| <i>Tips (Profundidad de Foco)</i> | 8 mm y 13 mm   | <i>Voltaje de Entrada</i> | 110 VAC / 60 Hz.                                  |
| <i>Vida Útil del Transductor</i>  | Hasta 525 disparos por transductor.                  | <i>Potencia Total</i>     | 500 W   |
| <i>Frecuencia de Trabajo</i>      | 4 MHz  | <i>Peso del Equipo</i>    | 37 kg, fácil de transportar                       |
| <i>Puntos por Disparo</i>         | Ajustable entre 16 y 576 puntos                      | <i>Dimensiones</i>        | 650 x 710 x 1240 mm                               |



Cra 34a #38-15 Sur,  
 Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec