



LINEA CORPORAL

MULTIFUNCIONAL 9 EN 1

MULTIFUNCIONAL 9 EN 1



DESCRIPCIÓN

Nuestro equipo multifuncional 9 en 1 combina 9 tecnologías en un solo dispositivo para tratamientos estéticos y terapéuticos. Incluye cavitación, radiofrecuencia tripolar y cuadripolar, radiofrecuencia corporal, vacuum con radiofrecuencia, martillo frío, cromoterapia facial, lipólisis láser y electroestimulación.

Estos tratamientos ayudan a reducir grasa localizada, tensar y tonificar la piel, mejorar la circulación sanguínea, reducir la celulitis y aliviar la tensión muscular. Su rango de velocidad ajustable permite tratamientos personalizados que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Su diseño ergonómico facilita su uso en clínicas y centros de belleza, ofreciendo resultados efectivos y seguros.

ANÁLISIS Y USO



Preparación del equipo: Conecta el equipo al suministro eléctrico adecuado (220V $\pm$ 2%) y selecciona la función deseada a través de la interfaz de control.

Seleccionar el tratamiento: Escoge entre las 9 funciones disponibles según las necesidades del cliente (cavitación, radiofrecuencia tripolar, cuadripolar, corporal, vacum con radiofrecuencia, martillo frío, cromoterapia facial, lipólisis láser y electroestimulación).

Ajustar los parámetros: Configura la velocidad de rotación, el tiempo del tratamiento (0-6 minutos) y la intensidad deseada, adaptándola al tipo de tratamiento y a la sensibilidad del cliente.

Aplicación del tratamiento: Utiliza las herramientas o cabezales específicos para cada función (aplicador de cavitación, electrodos de radiofrecuencia, martillo frío, etc.), aplicándolos suavemente en las áreas correspondientes.

Realizar monitoreo: Durante el tratamiento, observa las respuestas del cliente y ajusta los parámetros si es necesario para optimizar los resultados y la comodidad.

Finalización del tratamiento: Al finalizar, apaga el equipo y retira los accesorios utilizados. Limpia y desinfecta las herramientas para su próximo uso.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Personalización del tratamiento
- Reducción de grasa localizada
- Tensión y tonificación de la piel
- Mejora de la circulación sanguínea
- Relajación y alivio de la tensión muscular
- Cromoterapia facial
- Exfoliación suave y eliminación de células muertas
- Flexibilidad y control del tiempo de tratamiento



Resultados:

Reducción visible de la celulitis
Contorno corporal más definido
Tensado de la piel
Mejora en la salud de la piel
Relajación muscular
Resultados rápidos y duraderos





MULTIFUNCIONAL 9 EN 1

Especificaciones Técnicas

Voltaje de trabajo 220V $\pm 2\%$

Potencia de entrada 320VA $\pm 15\%$ /
380VA $\pm 15\%$

Frecuencia 50Hz

Peso 10.000Kg

Tamaño 35x37x22cm

Rango de velocidad de rotación 0~4000
revoluciones por minuto

Tipo 80-2 (12 agujeros)

Tuberías protectoras de plástico Sin escala,
opciones de 6 o 12 piezas



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec