



LINEA MEDICA

ND YAG PORTABLE

ND YAG PORTABLE



DESCRIPCIÓN

El equipo ND YAG portátil de IMEC es una solución avanzada en el campo de la estética médica, diseñada para eliminar una amplia variedad de tatuajes, marcas de nacimiento y pigmentaciones en la piel. Utiliza longitudes de onda de 532 nm, 1064 nm y 1320 nm, permitiendo un tratamiento efectivo y preciso en diferentes tipos de piel y colores de pigmento. Equipado con tecnología Q-switched Nd YAG, ofrece un suministro de energía ajustable de 1-2000 mJ, lo que permite personalizar los tratamientos según las necesidades del usuario.

La refrigeración por agua y aire garantiza un funcionamiento seguro y cómodo durante las sesiones. Este equipo es adecuado tanto para uso comercial como doméstico, ofreciendo resultados visibles en tratamientos de lifting facial, apretado de la piel, eliminación de poros y arrugas, así como rejuvenecimiento de la piel.

ANÁLISIS Y USO



1. Preparación del Equipo

Verificación y configuración: Asegúrate de que el equipo esté en buen estado, con todas sus piezas conectadas correctamente. Ajusta las longitudes de onda a 532 nm, 1064 nm y 1320 nm según el tratamiento.

Personalización del idioma y energía: Configura el idioma del equipo y ajusta los niveles de energía (1-2000 mJ) y frecuencia (1-10 Hz) para el tipo de tratamiento deseado.

2. Configuración del Tratamiento

Selecciona el programa adecuado: Enciende el equipo y elige el programa apropiado en la pantalla táctil (lifting facial, eliminación de pigmentos, etc.).

Ajusta la energía y frecuencia: Establece los parámetros según el tipo de piel y la sensibilidad del paciente.

3. Preparación del Paciente

Limpieza y protección ocular: Limpia la piel y aplica un gel conductor. Asegúrate de que el paciente use gafas de protección.

Prueba de sensibilidad: Realiza una prueba para ajustar los niveles de energía y frecuencia.

4. Procedimiento de Tratamiento

Aplicación de la energía: Realiza movimientos lentos y constantes sobre la piel del paciente, monitoreando la reacción y ajustando los parámetros según sea necesario.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Tratamiento integral
- Aplicaciones múltiples
- Tecnología Q-switched Nd YAG
- Personalización de tratamientos
- Sistema de refrigeración avanzada
- Menor dolor
- Recuperación rápida
- Reducción de efectos secundarios
- Máxima potencia de salida
- Rejuvenecimiento continuo
- Ajuste en tiempo real



Resultados:

- Reducción significativa de la visibilidad
- Eficiencia en la eliminación
- Resultados a largo plazo
- Reducción de arrugas y líneas finas
- Aumento de la producción de colágeno y elastina
- Aspecto rejuvenecido
- Eliminación efectiva de cejas, labios y otros bordados
- Reducción de Pigmentaciones Patológicas





ND YAG PORTABLE

Especificaciones Técnicas

<i>Longitudes de Onda</i>	532 nm 1064 nm 1320 nm	<i>Tecnología del Láser</i>	Q-switched Nd YAG
<i>Energía</i>	Ajustable de 1 a 2000 mJ	<i>Potencia de Salida</i>	600W ~ 800W
<i>Frecuencia de Pulso</i>	1-10 Hz ajustable	<i>Voltaje</i>	110V-60Hz
		<i>Dimensiones del Paquete</i>	530 mm x 460 mm x 350 mm



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec