


S O F T
LASER



BIO PIXEL 5 RF FRACCIONADA

BIO PIXEL 5 RF FRACCIONADA

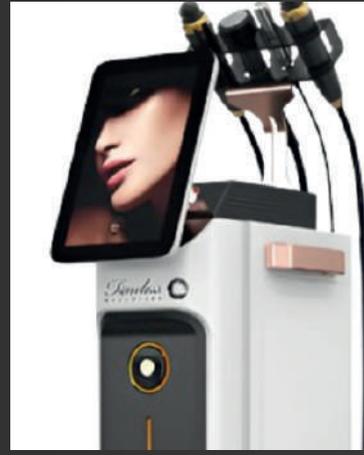

DESCRIPCIÓN

El BIO PIXEL V es un sistema avanzado de microagujas diseñado para rejuvenecer y reparar la piel, abordando problemas como arrugas profundas, estrías y cicatrices. Este equipo combina tecnología de punta con características sofisticadas, como modos monopolar y bipolar, profundidad de aguja ajustable (0.4-4 mm) y un sistema de vacuum automático que garantiza tratamientos cómodos y precisos. Estimula la producción de colágeno y elastina, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel, siendo seguro para todo tipo de piel, incluidas las más sensibles. Su diseño versátil lo hace ideal para áreas delicadas como el contorno de ojos, cuello y muslos. Con hasta 50 W de potencia, permite ajustes personalizados en energía, pulso y presión. Ofrece resultados visibles y duraderos con tiempos de recuperación mínimos, asegurando un tratamiento eficaz y no invasivo. Es una solución superior en estética médica para mejorar la calidad y apariencia de la piel.

ANÁLISIS Y USO



Análisis Breve del Procedimiento

-Procedimiento

Preparación del área a tratar: La piel debe estar limpia y libre de maquillaje o cremas. Es posible aplicar un anestésico tópico para mayor comodidad del paciente.

-Configuración del equipo: Seleccionar parámetros adecuados, incluyendo profundidad de aguja (0.2-4 mm), intensidad de energía, y nivel de vacuum según el área y tipo de piel.

-Aplicación del tratamiento: El cabezal con microagujas se desliza sobre la piel para crear microcanales controlados en la dermis, estimulando una respuesta de curación natural. En áreas sensibles (cuello, contorno de ojos), se utiliza menor intensidad y una sola pasada.

-Finalización: Al finalizar, se pueden aplicar sueros o productos tópicos, aprovechando los canales creados para una mejor penetración.

Aplicación del Tratamiento:

Preparación del paciente: Limpiar el área a tratar y, si es necesario, aplicar anestesia tópica para mayor comodidad.

Configuración del equipo: Ajustar la profundidad de las agujas (0.2-4 mm), intensidad de energía, nivel de presión y vacuum, dependiendo del grosor y sensibilidad de la piel.

Procedimiento: El cabezal con microagujas se desliza suavemente sobre la piel, creando microcanales en la dermis que estimulan colágeno y elastina. En zonas sensibles como cuello y muslos, se utiliza menor intensidad y una sola pasada.

Postratamiento: Finalizar con la aplicación de sueros o productos tópicos para potenciar la regeneración y aprovechar los microcanales creados.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios:


Estéticos: Rejuvenecimiento facial, Reducción de cicatrices, Mejora de estrías, Textura de la piel, Luminosidad, Tratamiento de poros dilatados.

Terapéuticos: Estimulación de colágeno y elastina, Mejora de la circulación sanguínea, Reparación de tejidos, Tratamiento no invasivo, Reducción de la inflamación.



Resultados:

Reducción de arrugas profundas, Disminución de cicatrices, Reducción de estrías, Mejora en firmeza y textura, Aumento de luminosidad, Resultados progresivos y duraderos.

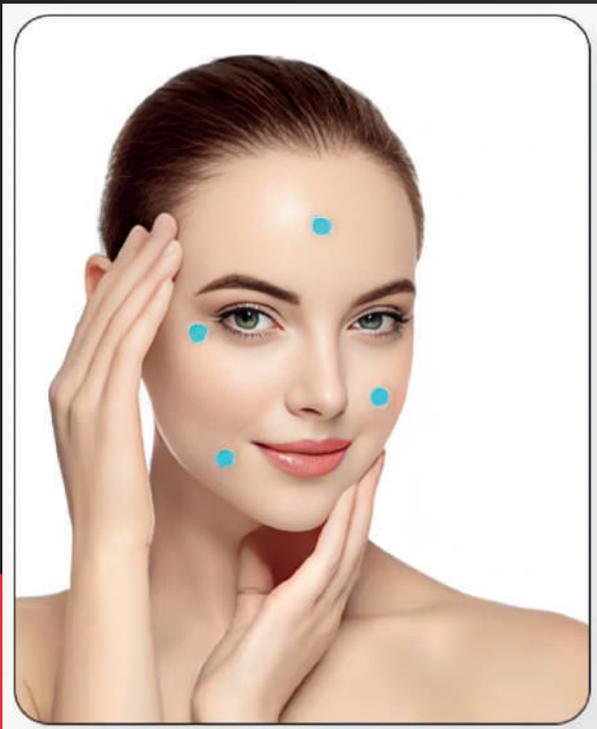



BIO PIXEL 5 RF FRACCIONADA

Especificaciones Técnicas

POTENCIA	Máximo 50 vatios	PESO NETO	36KG
FRECUENCIA	2MHz	DURACION DE PULSO	10-900MS
ENERGIA	1-10 Nivel	TAMAÑO DE LA MAQUINA	47*59*120CM
SISTEMA DE REFRIGERACION	1-3 Nivel	PROFUNDIDADES DE LA AGUJA	0.4-4MM Adjustable
NIVEL DE PRESION	1-4		



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec