



LINEA MEDICA

ONDAS ELECTROMAGNETICAS X 4

ONDAS ELECTROMAGNETICAS X 4



DESCRIPCIÓN

El EMS Sculp Hiempro X4 es un equipo innovador que utiliza tecnología HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic) para inducir contracciones musculares supramáximas, generando tonificación muscular y reducción de grasa de manera simultánea. Con un diseño avanzado, permite tratar abdomen, glúteos, muslos y brazos, logrando resultados efectivos sin cirugía ni tiempo de recuperación. Su tecnología garantiza más de 20,000 contracciones en solo 30 minutos, optimizando el crecimiento de las fibras musculares y estimulando la producción de colágeno. Es seguro, no invasivo y ofrece resultados visibles tras pocas sesiones. Además, cuenta con cuatro piezas de mano para tratar varias áreas al mismo tiempo y se adapta a diferentes perfiles corporales. Su pantalla táctil y sistema de doble refrigeración aseguran facilidad de uso y máxima eficiencia. Ideal para quienes buscan un contorno corporal definido y duradero, el Hiempro X4 combina innovación, comodidad y efectividad en un solo dispositivo.

ANALISIS Y USO



1. Configuración del Equipo

Ajusta los parámetros según la necesidad del paciente:

Frecuencia (calentamiento, trabajo, descanso).

Intensidad del campo magnético (de 0 a 7 Tesla).

Selecciona el tiempo de tratamiento (habitualmente 30 minutos).

2. Colocación de las Piezas de Mano

Fija las piezas de mano en la zona a tratar utilizando las correas ajustables.

Asegúrate de que las piezas estén firmemente colocadas para una aplicación uniforme.

3. Inicio del Tratamiento

Inicia el programa seleccionado en la pantalla táctil.

El equipo generará contracciones musculares supramáximas (más de 20,000 en 30 minutos).

4. Monitoreo del Paciente

Observa la comodidad del paciente durante la sesión. Es normal sentir una contracción intensa pero no dolorosa.

Asegúrate de que no haya movimientos o desplazamientos de las piezas.

5. Finalización del Tratamiento

Una vez completada la sesión, retira las piezas de mano y limpia la zona tratada. Informa al paciente sobre posibles sensaciones post-tratamiento (leve rigidez muscular, similar a un entrenamiento).

BENEFICIOS Y RESULTADOS


Beneficios

- Construcción de músculo y quema de grasa simultáneamente
- Levantamiento de glúteos no invasivo
- Tratamiento rápido y eficiente
- Pocas sesiones necesarias
- No requiere tiempo de recuperación
- Seguridad comprobada
- Resultados instantáneos
- Sensación similar a un entrenamiento



Resultados:

- Incremento promedio del 16% en masa muscular: Mayor fuerza, densidad y volumen en las zonas tratadas.
- Reducción promedio del 19% de grasa corporal: Mejora la definición y el contorno corporal.
- Efectos visibles rápidamente: Cambios evidentes en tono y forma tras las primeras sesiones.
- Mejoría general en la firmeza de la piel: Gracias a la estimulación de colágeno durante el tratamiento.

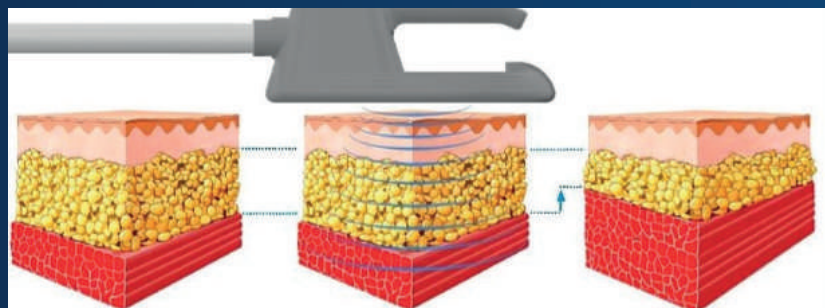



ONDAS ELECTROMAGNETICAS X 4

Especificaciones Técnicas

<i>Voltaje de entrada:</i>	AC 110V 50 / 60Hz	<i>Sistema de refrigeración:</i>	Doble sistema de refrigeración por aire
<i>Consumo de energía:</i>	<1500 VA	<i>Intensidad del campo magnético:</i>	8 Tesla
<i>Frecuencias:</i>	F1: Calentamiento 1 a 80 Hz F2: Trabajo: 1 a 135 Hz F3: Descanso: 1 a 50 Hz	<i>Contacción muscular (30 minutos):</i>	>20.000 veces
<i>Tiempo de frecuencia:</i>	1 a 5 minutos	<i>Pantalla:</i>	Touch Screen
<i>Intensidad del campo magnético:</i>	0-7 Tesla (1-100%)	<i>Piezas:</i>	4 piezas de mano
		<i>Potencia de salida:</i>	1700w



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec