




LINEA MEDICA

PHYSIO MAGNETO

PHYSIO MAGNETO

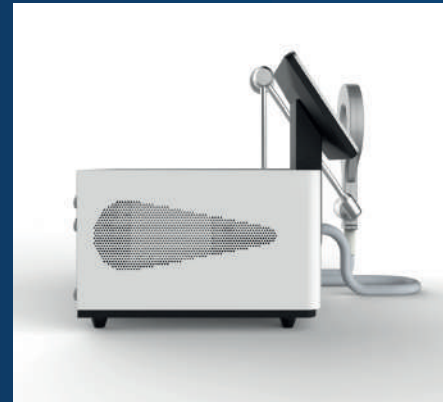

DESCRIPCIÓN

Physio Magneto de IMEC SAS es un equipo médico estético que utiliza un campo magnético para tratamientos curativos en áreas afectadas del cuerpo. Este dispositivo emplea una frecuencia de oscilación de hasta 130KHz y genera un campo magnético de 4 Tesla en su bobina, alcanzando una fuerza de campo de 0.4 Tesla a 4 cm de distancia. Utiliza un sistema de refrigeración por agua con capacidad para 2.5 litros para mantener su eficiencia operativa.

Physio Magneto está diseñado para reducir la inflamación, mejorar los efectos de las ondas de choque y estimular la regeneración celular en tejidos dañados. Ofrece beneficios como la reducción del dolor y la hinchazón, y mejora la circulación sanguínea y la absorción de oxígeno, facilitando una recuperación más rápida de lesiones y un bienestar general optimizado.

ANALISIS Y USO



Seleccionar la zona de tratamiento:

Identificar el área del cuerpo a tratar, como bikini/intimo, escote, piernas/brazos, cuello, pies o manos.

Ajustar las configuraciones del equipo según la zona seleccionada y las necesidades del paciente.

Iniciar el tratamiento:

Configurar la frecuencia de oscilación a 130KHz Max.

Ajustar la fuerza del campo magnético según las especificaciones (hasta 4 Tesla en la bobina y 0.4 Tesla a 4 cm de distancia).

Iniciar el tratamiento y proceder con el tratamiento deseado, monitoreando los parámetros en la pantalla de control del equipo.

Durante el tratamiento:

Mantener un monitoreo constante de los parámetros y asegurar que el sistema de refrigeración funcione adecuadamente para evitar sobrecalentamiento.

Ajustar la intensidad y duración del tratamiento según la respuesta del paciente y la efectividad deseada.

BENEFICIOS Y RESULTADOS


Beneficios

- Reducción del dolor
- Disminución de la hinchazón
- Estimulación de la regeneración celular
- Mejora de la circulación sanguínea
- Facilita la recuperación de tejidos
- Optimización del metabolismo celular



Resultados:

- Reducción de grasa localizada
- Mejora en la apariencia de la celulitis
- Piel más firme y tonificada
- Drenaje linfático efectivo
- Moldeado corporal
- Resultados progresivos

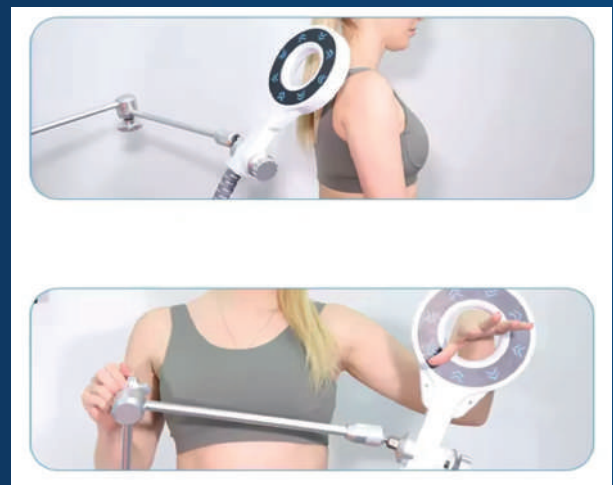



PHYSIO MAGNETO

Especificaciones Técnicas

Voltaje	100-240V 50/60Hz	Dimensiones del equipo	74 cm x 60 cm x 50 cm
Frecuencia de oscilación	130KHz Max	Rendimiento del campo	92 Tesla por segundo (T/S)
Fuerza de campo en la bobina	4 Tesla (T)	Fuerza de campo a 4 cm de distancia	0.4 Tesla (T)
Peso bruto	45KG		



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec