



# PISTOLA FROZEN SKIN

---



## DESCRIPCIÓN

La pistola Frozen Skin es un equipo médico estético innovador que combina un potente flujo de CO<sub>2</sub> con una concentración elevada de activos atomizados a alta presión y baja temperatura para ofrecer un tratamiento facial seguro, indoloro y rápido. Utilizando tecnología no invasiva, permite que ingredientes activos como el ácido hialurónico lleguen a las capas más profundas de la piel sin necesidad de agujas, proporcionando resultados duraderos. Este procedimiento ayuda a erradicar eficazmente arrugas, líneas finas y otras imperfecciones faciales en solo 5 minutos, logrando una reducción visible de hasta un 20-30%. Además, el efecto lifting y tensado de la piel es notable, alcanzando hasta un 10-15% de mejora en la apariencia general de la piel. La pistola Frozen Skin es portátil, fácil de usar y cuenta con una pantalla LED para un control preciso del tratamiento. Es ideal para profesionales que buscan ofrecer tratamientos efectivos y rápidos a sus clientes, proporcionando resultados visibles desde la primera sesión.

# ANÁLISIS Y USO

---



*Preparación: Colocar el equipo en un espacio adecuado y verificar los cartuchos CO<sub>2</sub> y los activos antiarrugas.*

*Conexión y configuración: Encender el dispositivo, conectar la fuente de alimentación y ajustar la presión y configuración en la pantalla LED.*

*Aplicación: Colocar la pistola sobre la zona a tratar y activar el dispositivo para atomizar los activos antiarrugas a través del CO<sub>2</sub>.*

*Duración del tratamiento: Realizar el tratamiento en aproximadamente 5 minutos.*

*Finalización: Apagar el dispositivo, retirar y desechar cartuchos usados, limpiar el equipo, y dar recomendaciones post-tratamiento al cliente.*

*Mantenimiento y evaluación: Verificar el estado del dispositivo y evaluar los resultados con los clientes para futuras sesiones y retroalimentación.*

# BENEFICIOS Y RESULTADOS


## Beneficios

- Rejuvenecimiento rápido
- Tratamiento no invasivo
- Efecto lifting y tensado
- Mejora de la circulación
- Hidratación profunda



## Resultados:

- Reducción visible de arrugas
- Efecto rejuvenecedor
- Efectos de lifting duraderos
- Resultados inmediatos
- Menor tiempo de recuperación

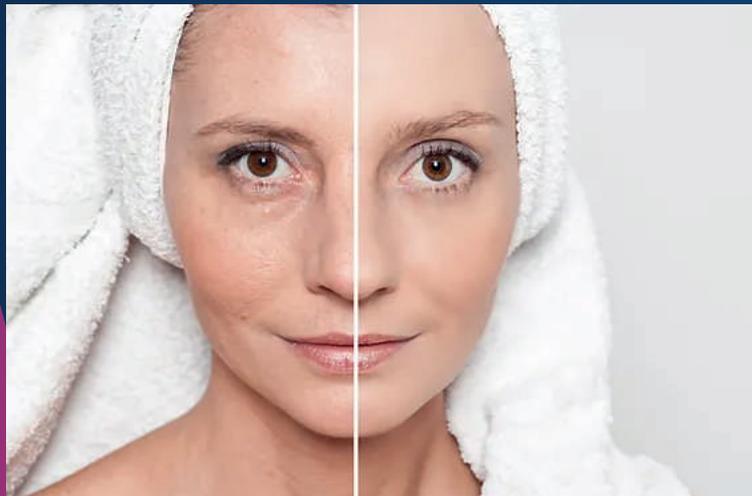



## PISTOLA FROZEN SKIN

### Especificaciones Técnicas

<i>Voltaje de entrada</i>	AC 110v - 220v
<i>Voltaje de carga</i>	12.6 V
<i>Cilindro de CO<sub>2</sub></i>	Cartucho CO <sub>2</sub> de 33g (2 unidades)
<i>Antiarrugas</i>	T3 ml (2 unidades)

<i>Potencia</i>	15V 1000mAH
<i>Material</i>	ABS
<i>Peso bruto</i>	2.7 kg
<i>Pantalla</i>	LED



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec