


S O F T
LASER



RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA BIOPIXEL 7

RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA BIOPIXEL 7

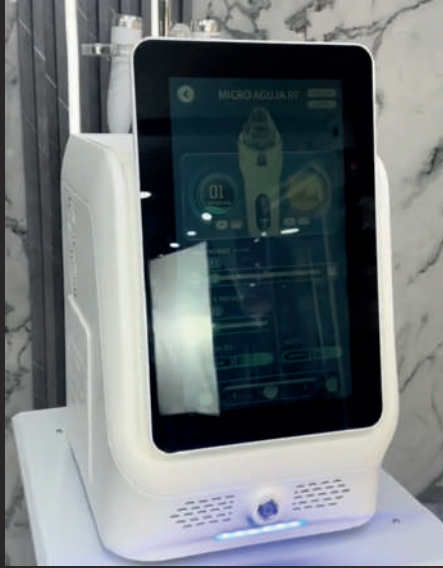

DESCRIPCIÓN

La BioPixel 7 es un avanzado equipo de radiofrecuencia fraccionada diseñado para rejuvenecer la piel y tratar una variedad de problemas cutáneos. Combina tecnología monopolar y bipolar con profundidades de aguja ajustables (0.4-4 mm), adaptándose a diferentes necesidades. Su sistema automático de vacuum optimiza la precisión en los tratamientos, mientras que los cabezales aislados y no aislados amplían las opciones terapéuticas. Es eficaz para reducir arrugas, mejorar la firmeza y elasticidad, tratar cicatrices, corregir hiperpigmentación y minimizar poros dilatados. Con una potencia máxima de 50W y energía ajustable en 10 niveles, garantiza resultados seguros y personalizados. Su diseño incluye cabezales de microagujas y fraccionados, junto con modos de enfriamiento. Ideal para clínicas estéticas, ofrece resultados visibles con tiempos de recuperación mínimos.

ANÁLISIS Y USO



Configuración de la máquina: Selecciona el cabezal adecuado según el tratamiento (microagujas o fraccionado). Ajusta los parámetros de profundidad de aguja (0.4-4 mm), nivel de energía (1-10) y duración del pulso (10-900 ms). Define el modo de trabajo: monopolar o bipolar, y activa el sistema de vacuum si es necesario.

Prueba inicial: Realiza una prueba en una pequeña área para asegurar que los parámetros son los correctos y cómodos para el paciente.

Ejecución del tratamiento: Aplica el cabezal sobre la zona objetivo, moviéndolo de forma uniforme para garantizar una cobertura adecuada. En tratamientos con microagujas, asegúrate de que el vacuum mantiene una succión constante para precisión.

Post-tratamiento: Limpia la piel con productos calmantes o antisépticos. Aplica cremas regeneradoras, hidratantes o bloqueador solar según las necesidades del paciente.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios:

- Estimulación de colágeno y elastina
- Resultados personalizados
- Rejuvenecimiento no invasivo
- Tratamiento de cicatrices
- Corrección de hiperpigmentación
- Reducción de poros dilatados
- Versatilidad terapéutica
- Tiempos de recuperación mínimos
- Eficiencia en resultados visibles
- Aplicación segura



Resultados:

A corto plazo: Mejora inmediata en la suavidad y luminosidad de la piel.

A mediano plazo: Disminución notable de arrugas, cicatrices y manchas tras 3-5 sesiones.

A largo plazo: Mayor firmeza y elasticidad, con una apariencia rejuvenecida que se mantiene con sesiones de mantenimiento periódicas.





RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA BIOPIXEL 7

Especificaciones Técnicas

<i>ENERGIA</i>	1-10 Nivel.
<i>PRESION</i>	1-4 .
<i>POTENCIA</i>	Max. 50 Valtos
<i>PESO NETO</i>	36 kg
<i>PESO BRUTO</i>	58 kg

<i>DURACION DEL PULSO</i>	10-900MS
<i>REFRIGERACIÓN</i>	1-3 nivel
<i>FRECUENCIA</i>	2MHz



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec