



LINEA MEDICA

RADIOFRECUENCIA NEEDLE BREEZE

RADIOFRECUENCIA NEEDLE BREEZE




DESCRIPCIÓN

El equipo Radiofrecuencia Needle Breeze combina tecnología avanzada de radiofrecuencia con micro agujas aisladas recubiertas de oro microcristalino para ofrecer tratamientos estéticos no invasivos y efectivos. Este dispositivo está diseñado para tratar una amplia gama de problemas de la piel, mejorando la textura y apariencia de la misma de manera significativa. Utiliza micro agujas cerámicas portátiles que penetran rápidamente en la piel, emitiendo energía de radiofrecuencia de manera precisa para estimular la circulación linfática facial, disolver grasa, y tensar y reafirmar la piel.

Con ajustes de profundidad de penetración y control de energía, este equipo es versátil y permite tratar diversas zonas del cuerpo, incluyendo rostro, cuello, ojos, abdomen, y más. Además, sus sondas terapéuticas facilitan un ajuste preciso según las necesidades del tratamiento. Ideal para profesionales en estética y dermatología, este equipo ofrece resultados rápidos en la reducción de arrugas, mejora de la textura de la piel, reducción de cicatrices, y el rejuvenecimiento general de la piel.

ANÁLISIS Y USO

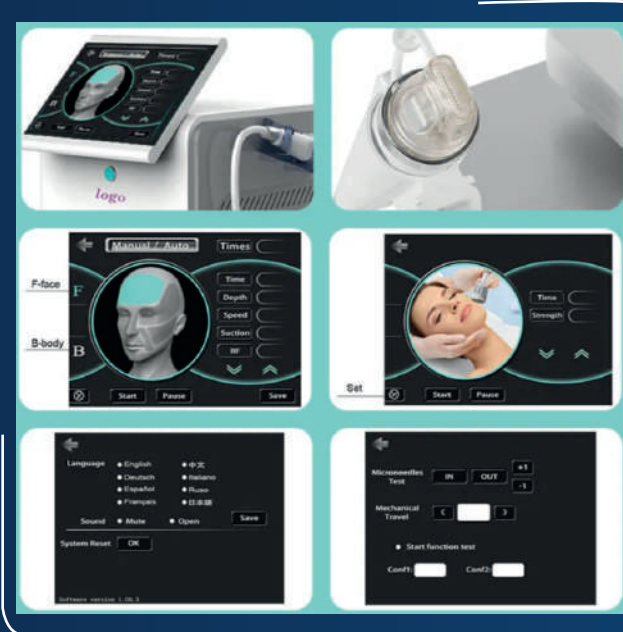

Ajuste de parámetros:

El profesional ajusta la profundidad de penetración según la zona a tratar (frente, rostro, ojos, mentón, cuello, abdomen, etc.) y las necesidades del paciente. Las profundidades van de 0.5 a 3.0 mm.

Se selecciona la frecuencia de salida (2-4 MHz) y la potencia adecuada (10-200W) para maximizar los resultados y comodidad del paciente.

Tratamiento facial:

Comienza con áreas menos sensibles como el mentón y el rostro, aplicando las micro agujas con movimientos lentos y uniformes.

En zonas delicadas como alrededor de los ojos, se reduce la profundidad de penetración y la energía para evitar molestias innecesarias.

Se presta atención especial a la reducción de arrugas, mejora de la textura de la piel, y la eliminación de las bolsas debajo de los ojos.

Tratamiento corporal:

Se aplican las micro agujas en el abdomen, mentón y otras áreas según sea necesario, ajustando la profundidad y la potencia de salida para cada zona.

Se trabaja en la reducción de grasa localizada y la reafirmación de

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Reafirmación y tonificación de la piel
- Reducción de arrugas y líneas finas
- Eliminación de bolsas y ojeras
- Mejora de la textura de la piel y reducción de poros
- Tratamiento de cicatrices y marcas
- Disolución de grasa localizada
- Promoción de la circulación linfática



Resultados:

Resultados visibles desde la primera sesión en términos de mejora de la textura y el tono de la piel.

Reducción gradual de arrugas y líneas finas con tratamientos continuos. Reducidos signos de envejecimiento, como las ojeras y las bolsas debajo de los ojos, mejorando la apariencia general.

Mejor control de la grasa corporal localizada, especialmente en zonas difíciles como el abdomen y los brazos.

Efecto rejuvenecedor integral, proporcionando una apariencia más juvenil y saludable de la piel.





RADIOFRECUENCIA NEEDLE BREEZE

Especificaciones Técnicas

VOLTAJE	AC 110V/220V, 50Hz/60Hz	RADIOFRECUENCIA RF	2MHz-4Mhz
PROFUNDIDAD DE LA AGUJA	0.2-3.5mm(0.1 paso)	PESO BRUTO UNICO	15.000 Kg
POTENCIA DE RF	10-200W	TAMAÑO DEL EQUIPO	15X25X30 cm



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec