



LINEA FACIAL

HYDRA SKIN CARE

HYDRA SKIN CARE



DESCRIPCIÓN

El Hydra Skin Care es un innovador dispositivo no invasivo diseñado para mejorar la apariencia y salud de la piel. Combina un sistema de microagujas para penetrar nutrientes y un nano pulverizador de oxígeno que hidrata profundamente mediante atomización de nivel nanométrico. Su tecnología ayuda a eliminar arrugas, tensar la piel, revitalizarla y ajustar el tono desigual. Con tres niveles de intensidad (verde, azul, roja), se adapta a las necesidades específicas de cada usuario.

Es portátil, seguro y práctico, ideal para rostro, ojos, labios, cuello, manos y más. Funciona sin agujas ni procedimientos quirúrgicos, ofreciendo resultados efectivos en hidratación y anti-vejecimiento. Además, su niebla fina mejora la piel seca, desbloquea poros y calma el enrojecimiento tras tratamientos faciales. Compatible con líquidos esenciales, es una solución profesional para hidratar, suavizar y revitalizar la piel en poco tiempo.

ANALISIS Y USO



Limpieza de la Piel:

Limpiar el área a tratar para eliminar suciedad, maquillaje o exceso de grasa. Esto asegura una mejor absorción de los nutrientes.

Activación del Dispositivo:

Encender el equipo y ajustar el nivel de intensidad. Si se usa el sistema de microagujas, configurar la profundidad según el tipo de piel.

Aplicación del Pulverizador:

Sostener el dispositivo a unos 5-10 cm de la piel. Activar el nano pulverizador de oxígeno y moverlo suavemente sobre el área tratada, cubriendo uniformemente todas las zonas. Dejar actuar la fina niebla durante al menos 60 segundos.

Uso del Sistema de Microagujas (Opcional):

Si se desea una penetración más profunda de nutrientes, aplicar el sistema de microagujas con movimientos suaves y controlados. Enfocarse en áreas específicas como líneas de expresión, arrugas profundas o poros dilatados.

Masaje Post-aplicación:

Con los nutrientes ya aplicados, realizar un suave masaje manual o con herramientas para mejorar la absorción.

Este paso también ayuda a relajar la piel.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Hidratación Profunda
- Mejora de la Apariencia de la Piel
- Revitalización Cutánea
- Limpieza Profunda
- Calma y Recuperación
- Versatilidad
- Practicidad y Seguridad
- Preparación para el Maquillaje




Resultados:

Hidratación Visible: La piel se siente más flexible, suave y menos seca desde el primer uso.

Textura Mejorada: Reducción de la apariencia de poros dilatados, líneas finas y arrugas con un uso constante.

Tono Uniforme: Atenuación de manchas y tono desigual, logrando una piel más homogénea y luminosa.

Aspecto Rejuvenecido: Incremento de la firmeza y elasticidad, logrando una piel más joven y revitalizada.

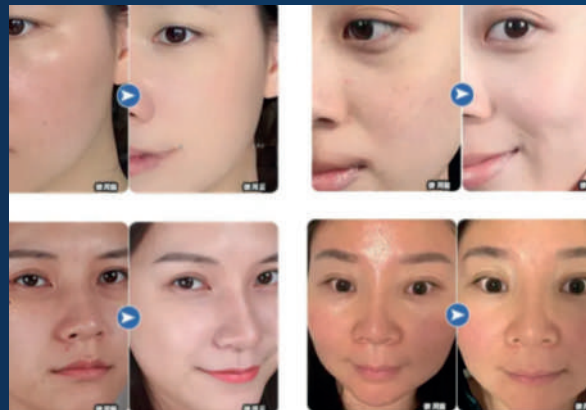



HYDRA SKIN CARE

Especificaciones Técnicas

<i>Voltaje de Entrada</i>	110V
<i>Frecuencia</i>	50/60 Hz
<i>Potencia</i>	5W
<i>Voltaje de Salida</i>	12V
<i>Peso</i>	0.700kg

Sistemas de Operación

Nano Pulverizador de Oxígeno
Presión de 85 kPa y
Sistema de Microagujas

Niveles de Intensidad

Luz Verde (Engranaje 1):
Hidratación y limpieza superficial.
Luz Azul (Engranaje 2):
Antiinflamatorio y calmante.
Luz Roja (Engranaje 3):
Rejuvenecimiento y estimulación celular.



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec