



LINEA MEDICA

ONDAS ELECTRO MAGNETICAS PRO MAX 1

ONDAS ELECTRO MAGNETICAS PRO MAX 1



DESCRIPCIÓN

El equipo ONDAS ELECTRO MAGNETICAS PRO MAX 1 es un dispositivo médico estético que utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia e intensidad para estimular contracciones musculares efectivas. Esto ayuda a construir masa muscular y quemar grasa al mismo tiempo, proporcionando resultados comparables a ejercicios intensos como 20,000 sentadillas. Es un procedimiento no invasivo, ideal para un levantamiento de glúteos sin cirugía. Los usuarios pueden experimentar mejoras desde la primera sesión, con resultados óptimos visibles después de dos a cuatro semanas. La tecnología se destaca por su seguridad, sin tiempo de inactividad, y su capacidad para realizar Sculpting Dual, permitiendo tratar simultáneamente a varias personas o al mismo paciente. Equipado con un sistema de refrigeración eficiente que garantiza su funcionamiento continuo las 24 horas del día, 7 días de la semana. Además, su pantalla HD de 15.6 pulgadas y modos de funcionamiento manual y automático facilitan su uso y personalización según las necesidades del tratamiento.

ANÁLISIS Y USO



1. Evaluación Previa

Consulta inicial: Evaluar el historial médico y los objetivos estéticos del paciente. Explicación del procedimiento: Informar al paciente sobre el uso y resultados esperados.

2. Preparación para el Tratamiento

Limpieza y desinfección del área.

Configuración del equipo: Ajustar frecuencia, intensidad y modo de funcionamiento. Posicionamiento de electrodos: Colocar correctamente para el tratamiento específico.

3. Realización del Tratamiento

Inicio de la sesión: Controlar la intensidad y las contracciones musculares.

Monitoreo continuo: Ajustar configuración según respuesta del paciente.

4. Post-Tratamiento

Finalización de sesión: Desconectar electrodos y enfriar el equipo.

Cuidado posterior: Recomendaciones de hidratación, dieta equilibrada y programación de siguientes sesiones.


5. Monitoreo de Resultados

Evaluación regular: Programar citas para evaluar progreso y ajustar tratamiento. Feedback y ajustes: Ajustar la frecuencia y configuración según necesidades del paciente.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Construcción de masa muscular y quema de grasa simultánea
- Levantamiento de glúteos no invasivo
- Entrenamiento efectivo sin actividad física intensa
- Resultados rápidos y duraderos
- Seguro y sin tiempo de inactividad

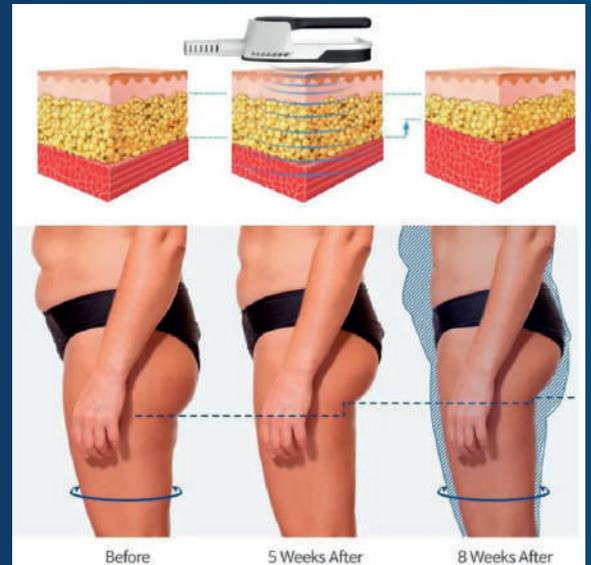

Resultados:

- Aumento promedio del 16% en la masa muscular
- Reducción media del 19% en la grasa corporal
- Formación de músculos específicos
- Resultados continuos
- Relevancia del sistema de refrigeración





ONDAS ELECTRO MAGNETICAS PRO MAX 1

Especificaciones Técnicas

<i>Poder:</i>	Voltaje de entrada	110/220v;50/60 Hz
	Consumo de energia	2.3 KVA
<i>Ondas magneticas:</i>	Intesidad de salida	0 - 7 Tesla
	Forma de pulso de estimulación Pulso	Hifem 300 us
<i>Detalles de empaque:</i>	Talla (Largo	55
	Ancho	50
	Alto)	110



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec